



## Innocid® RSD-i 70 Dezinfectant rapid pentru suprafețe

Dezinfectant rapid sub formă de spray

**Innocid**®

www.Innocid.com



### Când să folosiți Innocid RSD-i 70?

Folosiți Innocid RSD-i 70 pentru curățarea și dezinfectarea dispozitivelor medicale neinvazive și suprafețelor mici sau greu accesibile.

Nu folosiți Innocid RSD-i 70 pe suprafețe incompatibile cu alcoolul.

### Mod de utilizare

1. Nu folosiți Innocid RSD-i 70 pentru suprafețe care nu sunt compatibile cu alcoolul, precum sticla acrilică sau pielea artificială.
2. Pulverizați Innocid RSD-i 70 Dezinfectant rapid pentru suprafețe pe suprafețe de la o distanță de aprox. 30 cm.
3. Lăsați Innocid RSD-i 70 să-și facă efectul în timpul indicat.

Dacă este necesar, înlăturați orice surplus de preparat cu o cârpă de unică folosință, necolorată, fără scame.

### Date chimice ale Innocid RSD-i 70

**Conține:** etanol, 1-propanol  
**Aspect:** lichid incolor  
**Miros:** de lămâie

- Spectru larg de activitate în 30 de secunde
- Efect rapid
- Nu conține aldehide și fenoli
- RSD-i 70 are efect bactericid, fungicid, tuberculocid și virucid

### Date microbiologice ale Innocid RSD-i 70

Innocid RSD-i 70 Dezinfectant rapid pentru suprafețe are efect bactericid, fungicid, tuberculocid și virucid.

<b>Bacterii (incl. MRSA<sup>1</sup>)</b>	30 sec.
<b>Fungi</b>	30 sec.
<b>TbB</b>	30 sec.
<b>Virusuri</b>	30 sec.

<sup>1</sup>Toate produsele dezinfectante **Innocid** acționează împotriva tuturor formelor de stafilococ auriu și vă protejează de MRSA (stafilococ auriu rezistent la metilicilină).



CE

**Innocid RSD-i 70 este disponibil în următoarele forme:**

<b>REF</b>	<b>Produs unic</b>
91114	1 litru cu pulverizator

**Innocid**®

**Distribuitor:** SC Remix Com SRL, Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, camera 512B, sector 4, București; Tel/Fax: 021/313.77.88; E-mail: office@remixcom.ro

**Producător:** Prisman GmbH, WerkStrasse 23, D-68519, Viernheim, Germania; E-mail: info@prisman.de